

**channel
cleaner**[®]

WIRKSAMKEIT & SICHERHEIT

Einweg-Kugeln für die
Reinigung der Endoskopkanäle


VORTEILE

- Hoher Grad an Sauberkeit, Benutzerfreundlichkeit und Geschwindigkeit
- Reproduzierbarkeit und Standardisierung
- Ergonomisch: reduziertes Risiko von Berufskrankheiten



medical.cbc-europe.com


CBC GROUP

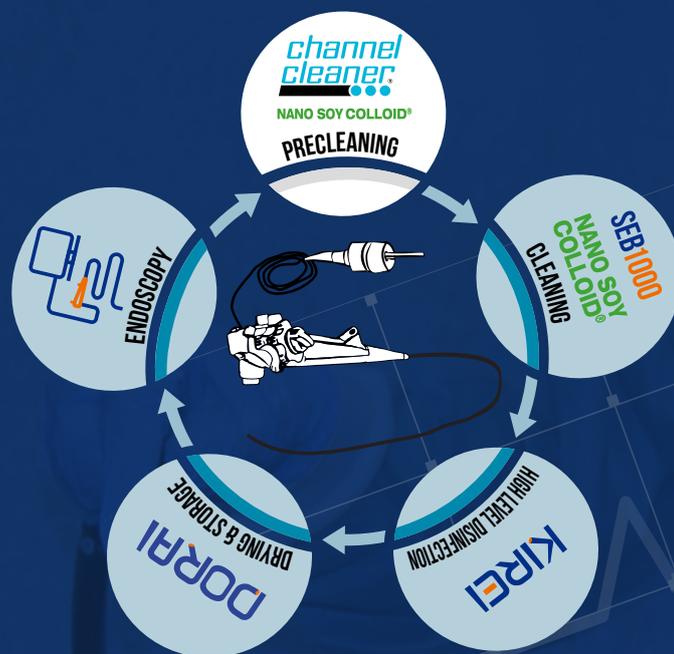

INNOVATION UND SICHERHEIT

Die manuelle Reinigung der Endoskope ist der kritischste Teil der Wiederaufbereitung. Am Ende der endoskopischen Untersuchung saugt der Bediener eine Reinigungslösung durch die Endoskopkanäle, um grobe Verschmutzungen durch Patientensekrete, Schleim oder Blut zu entfernen.

Channel-Cleaner-Kugeln, die vom distalen Endoskop abgesaugt werden, laufen durch die Biopsie- und Absaugkanäle. Eine Falle ermöglicht es dem Bediener, den ordnungsgemäßen Auswurf zu überprüfen. Der Durchgang der Kugeln durch die Kanäle ermöglicht die Reinigung und das Bürsten der Wände.

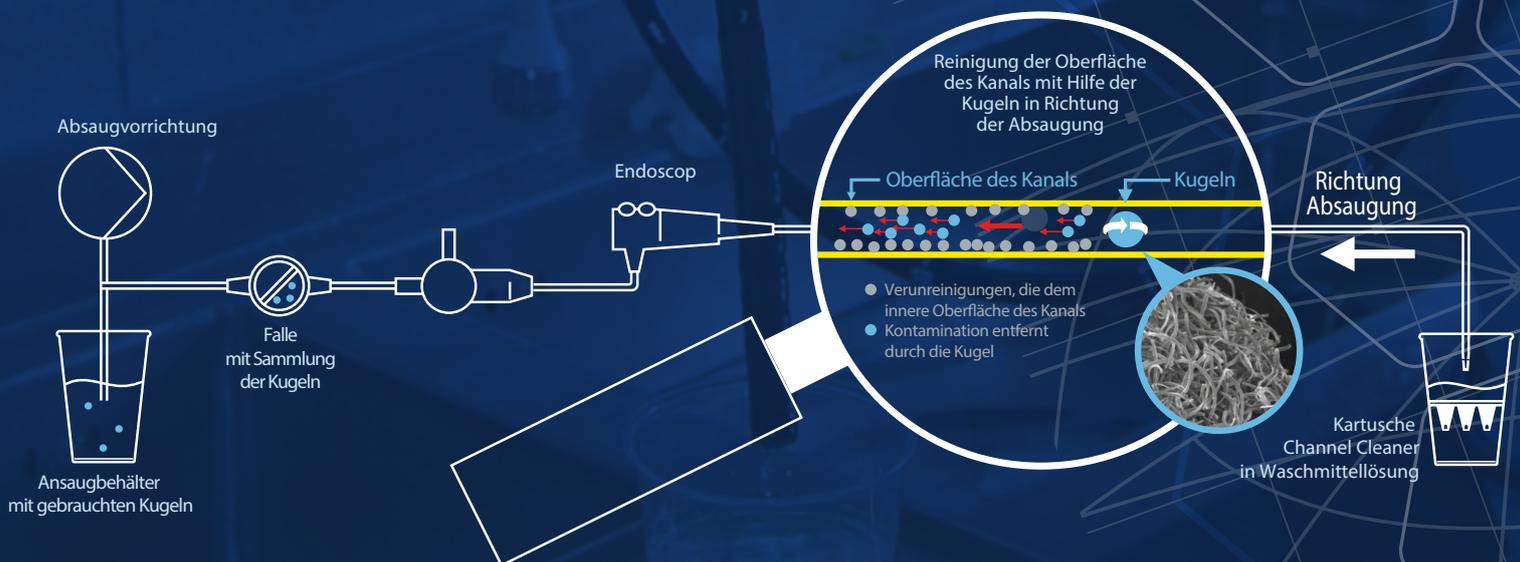

Effektive, sichere, wiederholbare und schnelle Kanalbürstung, dank der Mikrokugeln, die aus mehr als einer Million Fasern mit einer Größe von nur wenigen Mikrometern bestehen.

VERFÜGBARE MODELLE

Modell	Durchmesser der Kugel
Channel Cleaner 2.0	2.0 mm
Channel Cleaner 2.8	2.8 mm
Channel Cleaner 3.2	3.2 mm

Änderungen der technischen Daten, des Designs und des Zubehörs sind ohne Vorankündigung und ohne Verpflichtung des Herstellers möglich.



CBC (Europe) GmbH

Fritz-Vomfelde-Str. 6 • 40547 Düsseldorf

medical.cbc-europe.com

info@cbc-europe.com

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 082021 v1.0