

Modell KOKONAT - Endo Natural Cleaner

Hersteller CBC (Europe) S.r.l Via
Zanica, 25
24050 Grassobbio
(BG) Italien

Auf einen Blick

KOKONAT ist ein natürliches, nichtionisches Waschmittel aus Kokosnuss. Die aus der Kokosnuss extrahierten Fettsäuren entfernen effizient den Schmutz von Oberflächen. KOKONAT kann auf verschiedenen Oberflächen aus unterschiedlichen Materialien verwendet werden. Leicht ausspülbar. Es enthält keinen Alkohol.

Chemische Zusammensetzung

<i>Inhaltsstoffe</i>	<i>% p/p</i>
Wasser	85
Fettsäuren der Kokosnuss	15

Anwendungsbereiche

Manuelle und automatische Reinigung von medizinischen Geräten und deren Zubehör (z.B. Endoskope, chirurgische Instrumente, etc.). Das Produkt kann in einem Ultraschallbad verwendet werden.

Art der Verwendung

Manuelle Reinigung und/oder Ultraschallbäder

1:500 verdünnen (2 ml pro Liter Wasser). Tauchen Sie das Gerät für 5 Minuten in die Lösung ein; bei hartnäckigen und/oder verkrusteten organischen Rückständen verdoppeln Sie die Konzentration und die Eintauchzeit.

Mit frischem Wasser ausspülen.

Das Reinigungsmittel kann in Leitungswasser verdünnt werden.

Bei kaltem Wasser (< 10°C) oder sehr hartem Wasser kann sich das Waschmittel nicht richtig lösen; in solchen Fällen verdünnen Sie es mit lauwarmem Wasser (> 20°C).

Automatisches Waschen im KIREI Endoskop-Waschgerät

Setzen Sie die 5-Liter-Dose in KIREI ein; KIREI nimmt automatisch die richtige Menge an Waschmittel für jeden Waschgang.

Lagerung

Bewahren Sie das Waschmittel in der Originalverpackung auf. Das Reinigungsmittel ist an einem sauberen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung bei normaler Temperatur (5-30° C) zu lagern. Lagern Sie das Reinigungsmittel an einem Ort, an dem es keinen Wärmequellen und/oder direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist. Halten Sie den Behälter fest verschlossen. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.

Haltbarkeitsdauer: 36 Monate.

Warnungen

Direkter Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden. Nicht brennbar.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Verpackung

Artikel Code	Beschreibung
DT-KKN5000	5-Liter-Kanister
-	Schachtel mit vier 5-Liter-Kanistern

Entsorgung

Unterliegt den örtlichen Vorschriften. Entsorgen Sie den Behälter nicht in der Umwelt. Der Behälter kann nicht wiederverwendet werden.

EU-Verordnung

Dieses Gerät entspricht der Verordnung (EU) 2017/745.

Klassifizierung: KlasseI (Anhang VIII Regel 1)
Konformitätsbewertungsverfahren:AnhangII und III

CND:Z12029085
Basis-UDI-DI:805053900DT-KKN3F